

nenoTM

*inspired by Children
designed by Parents*

bene

MOBILNY NEBULIZATOR,
INHALATOR SIATECZKOWY



**dla niemowląt
i całej rodziny**



**etui na baterie
do działania
beprzewodowego**



**wyrób
medyczny**



OD PIERWSZYCH MIESIĘCY ŻYCIA

Neno Bene to kolejny produkt medyczny w portfolio naszej marki. Najnowszy nebulizator siateczkowy to innowacyjny produkt na polskim rynku, ponieważ został zaprojektowany z myślą nie tylko o terapii inhalacyjnej u dorosłych, ale także u dzieci. To nebulizator medycznie dostosowany do potrzeb niemowląt już od 1 miesiąca ich życia.



ASTMA, ALERGIA, NIEŻYT GARDŁA

Astma: szacuje się, że 1 na 10 osób ma zdiagnozowaną astmę we wczesnym lub późniejszym stadium. Nebulizator pomaga astmatykom w radzeniu sobie z objawami, poprzez inhalację z solą fizjologiczną lub przyjmowanie sterydów wziewnych.

Alergie: alergia na sierść, roztocza, pyłki – każdy z nas ma w rodzinie lub zna takiego alergika. Kichanie, duszności, kaszel, uporczywy katar to dla alergika codzienność. Nebulizator membranowy Neno Bene pozwala na szybkie i łatwe podanie leków, jednocześnie otwierając drogi oddechowe, umożliwiając łatwiejsze usuwanie śluzu czy flegmy.


Nieżyt gardła: chore gardło wiąże się często z bólem i problemem z przełykaniem. Neno Bene niweluje ten problem – lek dostarczany jest za pomocą mgiełki bezpośrednio do dróg oddechowych.





TERAPIA PO COVID-19

Pandemia zmieniła nasze podejście do zdrowia i dbania o drogi oddechowe. Stosowanie nebulizatora siateczkowego nie tylko umożliwia stabilniejsze i łatwiejsze oddychanie, ale także przyspiesza rehabilitację dróg oddechowych po Covid-19 i może być stosowany jako terapia wspomagająca w ostrych chorobach dolnych dróg oddechowych.

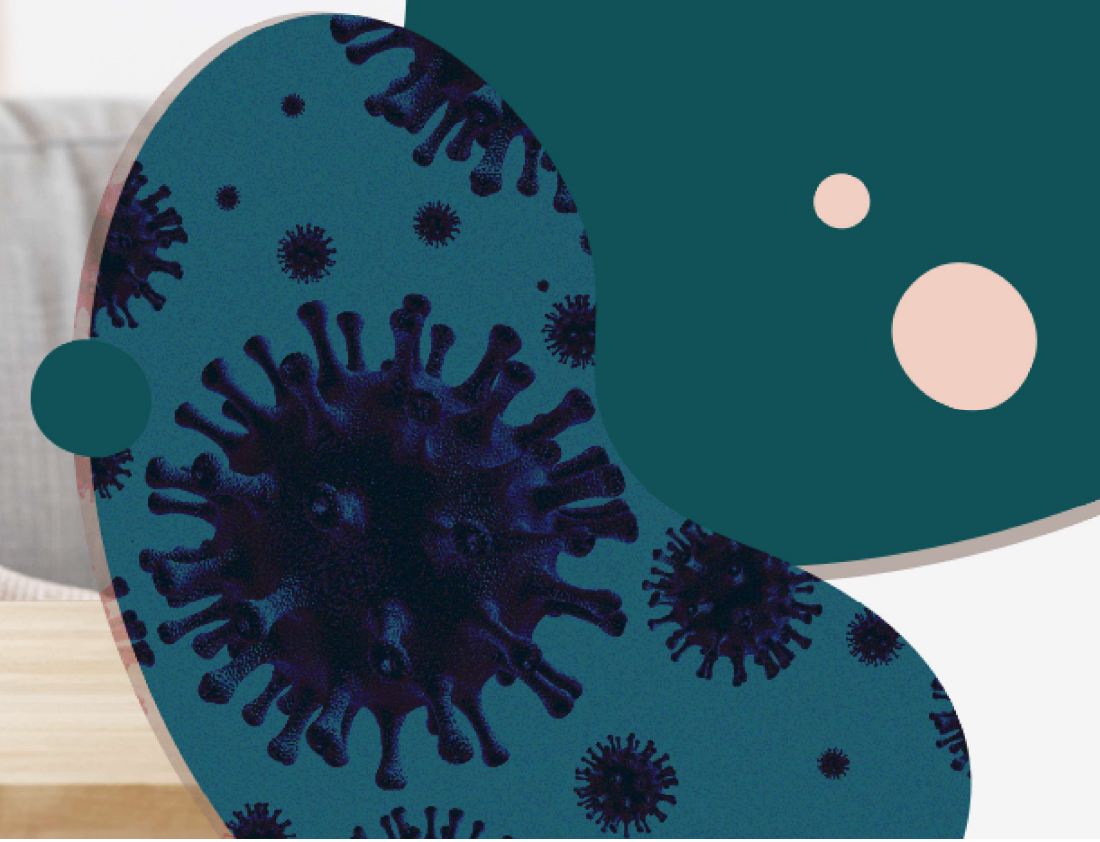



NEBULIZACJA W DOMU

Nebulizacja to rodzaj leczenia inhalacyjnego, które jest bezbolesne i nieinwazyjne. Zwiększa prędkość, z jaką leki są wchłaniane do krwiobiegu, tworząc mgiełkę, która jest wdychana i rozprowadzana przez przepływ tlenu we krwi. Jest to znacznie bardziej wydajne niż konwencjonalne metody stosowania leków. Taki zabieg możesz prosto wykonać w domu. Wystarczy, że podłączysz Neno Bene do źródła zasilania, nałożysz maseczkę i gotowe! Oddychaj...



MOBILNY

Nebulizator membranowy Neno Bene jest naprawdę mały, lekki, i w pełni przenośny, dzięki czemu idealnie nadaje się nie tylko do użytku domowego, ale również podczas spacerów, podróży czy wakacji. Możesz podpiąć go do powerbanka lub do dołączonego do zestawu akumulatora zasilanego 2 bateriami typu „paluszek” i korzystać z urządzenia bezprzewodowo. Całość zmieści się w kieszeni lub torebce, ale Neno Bene ma swój własny woreczek z tkaniny, w którym możesz przechowywać zarówno nebulizator, jak i wszystkie






ZAWSZE POD RĘKĄ – NAWET PODCZAS PODRÓŻY

Siateczkowy nebulizator Neno Bene to urządzenie o bardzo niewielkich wymiarach – bez trudu możesz je przechowywać w domu, a także zabrać w podróż. Może być zasilany bateriami, możesz podłączyć go do gniazdka, a dzięki portowi USB-C możesz go także podpiąć do laptopa czy ładowarki samochodowej. Neno Bene to dobra inwestycja w zdrowie.



NATURALNA TERAPIA W CZASIE PRACY

Nebulizator Neno Bene to urządzenie wielokrotnego użytku, składające się z niewielkiego pojemniczka na lek, silikonowej maski i przewodu zasilającego z końcówką USB, którą można podpiąć do laptopa. Dzięki temu możesz mieć go przy sobie w pracy i zastosować, gdy przyjdzie taka potrzeba. Wystarczy swobodnie oddychać. Prosta konstrukcja sprawia, że ręce masz zawsze wolne, więc możesz nie odrywać się od pracy podczas inhalacji.

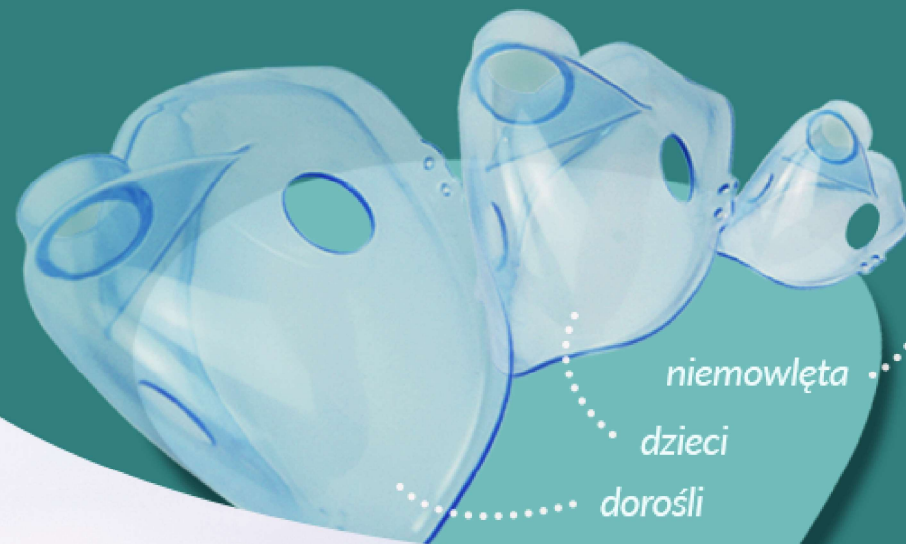

niemowlęta

dzieci

dorośli



DLA CAŁEJ RODZINY

Nebulizacja jest świetnym sposobem nawilżania dróg oddechowych i oczyszczania ich podczas infekcji. Zaletą nebulizacji jest też to, że nie podrażnia żołądka, mogą więc ją stosować zarówno dzieci, które nie potrafią jeszcze przełknąć tabletki oraz dorośli, którzy cierpią na dolegliwości układu trawiennego. Nebulizację za pomocą Neno Bene możesz stosować nawet u chorych niewspółpracujących. W zestawie znajdują się 3 rozmiary masek – dla dorosłych, dla dzieci i dla niemowląt.



WYGODNA MASECZKA

Nebulizacja odbywa się przez wygodną maskę, a nie przez smoczek, dzięki czemu jest wydajniejsza i bardziej komfortowa – zarówno dla Rodziców, jak i Maluszka. Dziecko mniej więcej do 12 miesiąca życia nie oddycha przez usta, tylko przez nos. Dlatego nebulizacja za pomocą smoczka jest mniej efektywna niż za pomocą maski.







INNOWACYJNY POJEMNIK NA LEKI

Neno Bene do produkcji aerozolu wykorzystuje drgania specjalnej siateczki, która rozbija wodę z lekiem na parę wodną o cząsteczkach wielkości 1 - 5 μ m. Innowacyjny kształt pojemnika, który doczepia się do maski, zapewnia większą wydajność i wykorzystanie leku do ostatniej kropli. To wymienna część nebulizatora. Trzy maski wykonane są z elastycznego tworzywa, które dopasowują się do kształtu twarzy. Maski łatwo utrzymać w czystości, wystarczy je umyć w letniej wodzie z niewielkim dodatkiem delikatnego detergentu, osuszyć i schować do dedykowanego woreczka Neno.



W KAŻDYM WIEKU

Z nebulizatora siateczkowego z powodzeniem mogą korzystać osoby w każdym wieku. W zestawie znajdują się 3 rozmiary masek – dla dorosłego, dla dziecka i dla niemowlaka. Dzięki Neno Bene nie musisz przyjmować niewygodnej pozycji nad misą z parującym naparem. Nebulizacja to oddychanie powietrzem z rozpylonym lekiem. Neno Bene to produkt medyczny i powinien być stosowany wyłącznie z płynami i lekami przeznaczonymi do nebulizatorów membranowych. Nie należy wlewać do niego olejków oraz substancji o dużej gęstości.

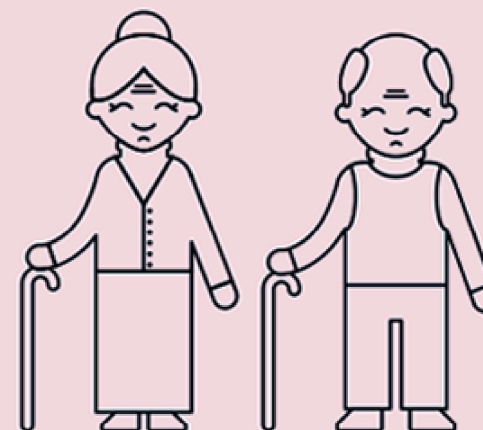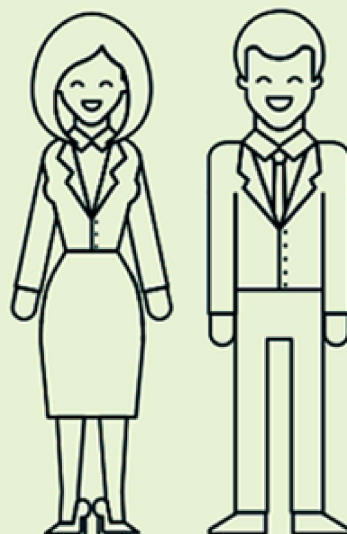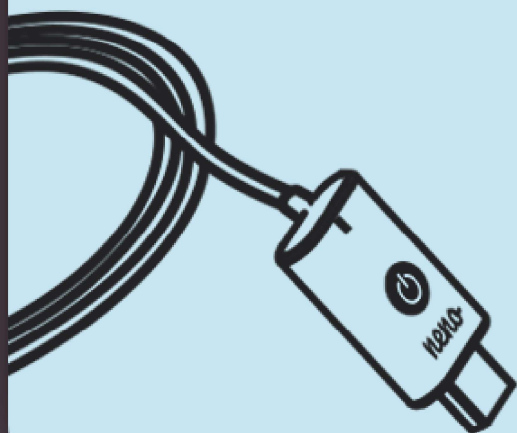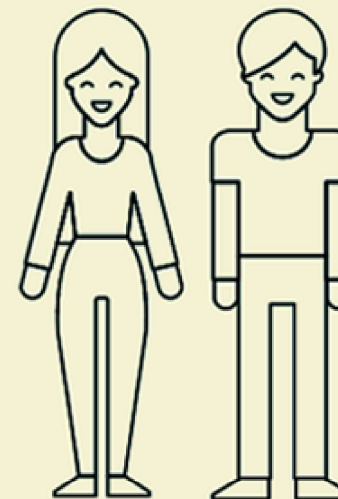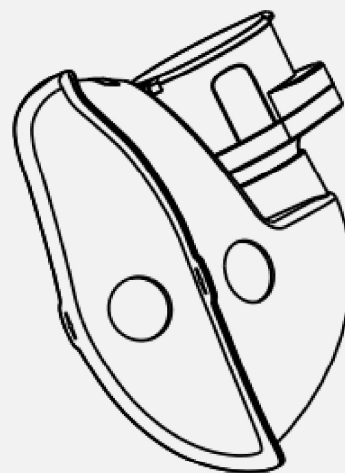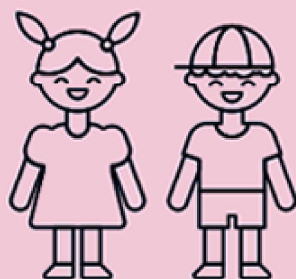

WYJĄTKOWO CICHA PRACA

Poprzez wibracje o wysokiej częstotliwości lek jest przesiewany na małe cząsteczki o wielkości zaledwie 1-5 mikronów, które mogą wnikać głębiej w drogi oddechowe i docierać do źródła infekcji.

Częstotliwość drgań to aż 110 tys. na sekundę przy zachowaniu głośności poniżej 35 dB.

Nebulizator Neno Bene jest bardzo cichy, co jest szczególnie przydatne w pracy, w podróży samolotem czy wtedy, gdy Twoje dziecko ma zaburzenia sensoryczne lub źle reaguje na hałas.



DANE TECHNICZNE

Model: Neno Bene

Zasilanie:	DC 5V 1A
Wydajność aerozolu	≥ 0.20 ml/min
Wielkość cząstek:	MMAD ok. 5µm
Pojemność zbiornika na lek:	≤ 8ml
Zasilanie:	Kabel USB lub bateria 2x AA (brak w zestawie)
Wymiary jednostki głównej:	42x34x40 mm
Waga całego zestawu:	72 g
Kod EAN:	5902479672540
Kod CN:	9019209000
Wymiary pudełka:	122x122x78 mm
Waga pudełka:	187 g
PN:	NEN-MAM-INH002

