

neno[®]

sereno

ultradźwiękowy
detektor tętna płodu



Od 12 tyg.
ciąży



Wodoodporna
sonda wysokiej
czułości



Prosta
obsługa



Bezpieczny
dla mamy
i dziecka



Wyświetla tętno
(FHR) w czasie
rzeczywistym



Regulacja
głośności



Medical Device

Spokój mamy już od 12 tygodnia ciąży

Neno Sereno to ultradźwiękowy detektor tętna płodu, który pozwala usłyszeć bicie serca dziecka już od 12. tygodnia ciąży. To duże wsparcie dla przyszłych mam, gdy czas pomiędzy wizytami u lekarza prowadzącego ciążę potrafi się dłużyć. Wiele podobnych urządzeń umożliwia sprawdzanie tętna dopiero około 16. tygodnia. **Jednak Neno Sereno daje możliwość wcześniejszego monitorowania bicia serca** i spokojniejszego przeżywania tego wyjątkowego czasu. Dzięki niemu mama może na bieżąco wstuchiwać się w rytm serca maluszka, zyskując więcej spokoju, bliskości i poczucia, że wszystko przebiega prawidłowo. Urządzenie wspiera codzienną troskę o dziecko, jednak nie zastępuje regularnych wizyt lekarskich ani badań kontrolnych.



Wysoka czułość

Detektor tętna płodu Neno Sereno został wyposażony w czułą technologię ultradźwiękową, która umożliwia wykrywanie tętna płodu i wsluchiwanie się w bicie serca dziecka w domowym zaciszu. Dzięki temu **przyszła mama może łatwiej monitorować sytuację pomiędzy wizytami u lekarza** i zyskać większy spokój wtedy, gdy najbardziej tego potrzebuje. To praktyczne wsparcie, które pozwala jeszcze mocniej poczuć wyjątkową więź z dzieckiem.



Wyrób medyczny – do domu, szkół rodzenia i placówek medycznych

Neno Sereno to wyrób medyczny przeznaczony nie tylko do użytku domowego, a także do stosowania w szkołach rodzenia i placówkach medycznych. Urządzenie zostało stworzone z myślą o przyszłych mamach, które chcą w prosty i wygodny sposób sprawdzać tętno dziecka między wizytami u lekarza. Aby pomiar był bardziej komfortowy i prawidłowy, **detektor tętna płodu Neno Sereno należy stosować razem z żelem przewodzącym**, który wspiera przewodzenie fal ultradźwiękowych i ułatwia wykrycie bicia serca płodu. Dzięki temu Neno Sereno pomaga na bieżąco monitorować sytuację i daje mamie dodatkowe poczucie spokoju w codziennej trosce o maluszka.



Łatwe czyszczenie dzięki wodoodpornej główicy

Wodoodporna głowica Neno Sereno ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości – po zakończonym pomiarze można ją bezpiecznie wyczyścić przy użyciu suchego ręcznika, aby usunąć resztki żelu, a następnie przetrzeć sondę wilgotną ściereczką. To praktyczne rozwiązanie, które pomaga szybko przygotować detektor do kolejnego użycia – wygodnie, higienicznie i bez wysiłku.



Komfortowe odsluchiwanie tętna

Neno Sereno **oferuje 7 poziomów głośności**, dzięki czemu można łatwo dopasować dźwięk do własnych potrzeb i warunków otoczenia. Dedykowane przyciski „+” i „-” pozwalają szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność, bez przerywania pomiaru. Mama może słuchać bicia serca dziecka głośniej, ciszej albo w bardziej dyskretny sposób – wystarczy podłączyć słuchawki przewodowe AUX, aby stworzyć spokojną chwilę bliskości z maluchem.



Zawsze pod ręką

Neno Sereno jest lekki i poręczny, dlatego łatwo znaleźć dla niego miejsce w torebce, szufladzie czy walizce. Można wygodnie korzystać z niego w domu, zabrać ze sobą w podróż albo mieć blisko wtedy, gdy mama potrzebuje upewnić się, że wszystko jest w porządku.

W zestawie znajduje się praktyczny woreczek do przechowywania, który pomaga chronić urządzenie przed zabrudzeniami i zarysowaniami, a także ułatwia utrzymanie wszystkich elementów w jednym miejscu.



Prosta obsługa jednym przyciskiem

Detektor tętna płodu Neno Sereno został zaprojektowany tak, aby korzystanie z niego było intuicyjne i wygodne już od pierwszego użycia. **Wystarczy wcisnąć jeden przycisk, aby uruchomić urządzenie** i rozpocząć nasłuchiwanie tętna dziecka. Prosta obsługa sprawia, że przyszła mama może skupić się na spokojnej chwili, bez skomplikowanych ustawień i zbędnych czynności.



Tętno widoczne w czasie rzeczywistym na czytelnym wyświetlaczu

Czytelny wyświetlacz Neno Sereno ułatwia kontrolę pomiaru podczas każdego użycia. **Tętno dziecka pokazywane jest w czasie rzeczywistym**, co sprawia, że mama może od razu zobaczyć wynik na ekranie i spokojnie wsłuchać się w bicie serca maluszka. Przejrzysty ekran sprawia, że korzystanie z detektora jest wygodne, intuicyjne i jeszcze bardziej komfortowe.



Gdzie przykładać głowicę detektora?

Miejsce przykładania głowicy Neno Sereno **zależy od etapu ciąży oraz ułożenia dziecka:**

1. Od 12. tygodnia ciąży tętna warto szukać na środku brzucha lub nieco poniżej pępka.
2. Po 24. tygodniu ciąży bicie serca płodu najlepiej wykryć w miejscu, w którym znajdują się plecy dziecka. Ponieważ wyczuwalne ruchy to najczęściej aktywność nóg, głowicę warto przykładać po przeciwnej stronie niż ta, po której mama odczuwa kopnięcia.
3. Między 32. a 40. tygodniem ciąży: miejsce nasłuchiwania zależy od pozycji malucha – jeśli dziecko jest ułożone główką do dołu, tętna można szukać po lewej lub prawej stronie pod pępkiem, a przy ułożeniu pośladkowym – nad pępkiem, również po jednej ze stron brzucha.


Aktywność dziecka i łatwość odnalezienia tętna mogą się zmieniać w zależności od jego ułożenia, pory dnia, czy emocji mamy.



12-24 TYDZIEŃ



24-30 TYDZIEŃ

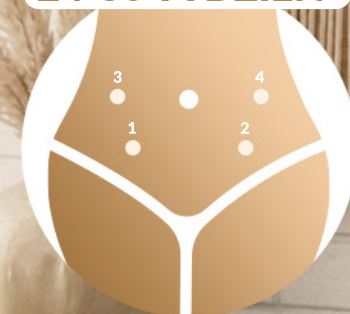

32-40 TYDZIEŃ



neno[®] sereno

DANE TECHNICZNE

Tryb pracy:	Doppler z falą ciągłą (CW)
Zasilanie:	2x1,5 V bateria AA (brak w zestawie)
Wejście:	DC 3V
Ekran:	Wyświetlacz OLED 2.7x1.5 cm
Wodoodporność:	Jednostka główna IP22; sonda ultradźwiękowa IPX7
Środowisko pracy:	Temperatura: 10°C–40°C (50°F–104°F); wilgotność: 15% RH–85% RH; ciśnienie: 70 kPa–106 kPa
Wymiary jednostki głównej:	13,6x7x4,1 cm
Czułość:	Od 12. tygodnia ciąży
Częstotliwość sondy:	2 MHz ± 5%
FHR – czułość akustyczna:	>90 dB
Zakres pomiaru FHR:	60 bpm–210 bpm
Dokładność:	± 2 bpm
Efektywna powierzchnia promieniowania sondy:	157 mm ² ± 30%
Automatyczne wyłączenie:	Tak
Wymagania dotyczące ultradźwiękowego środka transmisyjnego:	pH: 5,5–8
Waga:	Jednostka główna: 103 g; sonda: 49 g
Wymiary pudełka:	20,5 x 13,3 x 4,7 cm
Waga pudełka:	289 g
Kod EAN:	5902479679884
Zawartość zestawu:	Ultradźwiękowy detektor tętna płodu woreczek do przechowywania instrukcja obsługi
Importer:	KGK TREND sp. z o.o. ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków

NAGRODY DLA
FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:



Jeśli nie wiesz jaki produkt wybrać, potrzebujesz pomocy, wsparcia albo masz pytania do ekspertów, zadzwoń lub napisz bezpośrednio do Centrum Wsparcia Klienta Neno. Infolinia: 731 594 301, mail: info@neno.pl